

➤ RepoMark D

RepoMark D Repositionierbarer Lokalisierungsdraht

RepoMark D ist ein repositionierbarer Lokalisierungsdraht zur präoperativen Markierung nicht tastbarer Brustläsionen. Das System unterstützt die exakte Lokalisation auffälliger Gewebeveränderungen und bietet Chirurg*innen während der operativen Entfernung eine zuverlässige Orientierung.

Entwickelt für den Einsatz in der Senologie ermöglicht die repositionierbare Drahttechnik eine Korrektur der Markerposition bei Bedarf. Der doppelt verdrehte Nitinol-Draht mit Doppelhaken sorgt nach dem Freisetzen für eine stabile Verankerung im Gewebe.

Key Feature

REPOSITIONIERBAR FÜR MAXIMALE PRÄZISION

- REPOSITIONIERBAR
- FLEXIBEL KORRIGIERBAR
- PRÄZISE LOKALISIERUNG
- KORREKTUR VOR FREISETZUNG MÖGLICH



100%
VERFÜGBAR



MADE IN
GERMANY



INT.
STANDARDS



VOR-ORT
SUPPORT



FAMILIEN
GEFÜHRT

➤ Produktvorteile

- Repositionierbarer Nitinol-Draht für flexible Korrekturen der Markerposition
- Präzise Platzierung durch hochwertige Kanüle mit 16°-Lanzettenspitze
- Echogene Kanülenoberfläche für gute Ultraschallsichtbarkeit
- Sichere Fixierung mittels Schiebeklemme auf der Haut
- Zentimetermarkierungen und Schiebestopper zur exakten Tiefenkontrolle
- Entwickelt für eine zuverlässige präoperative Lokalisation nicht tastbarer Brustläsionen

➤ Indikationen


- Präoperative Markierung nicht tastbarer Brustläsionen
- Unterstützung der chirurgischen Lokalisation in der Senologie
- Orientierung bei brusterhaltenden Operationen
- Exakte Kennzeichnung suspekter Gewebeveränderungen

➤ Anwendung

- **RepoMark D** wird perkutan unter bildgebender Kontrolle in die Zielregion eingebracht.
- Nach Erreichen der gewünschten Position wird der repositionierbare Nitinol-Draht freigesetzt.
- Bei Bedarf kann die Position vor der endgültigen Platzierung korrigiert werden.
- Nach der erfolgreichen Positionierung sorgt die Doppelhaken-Struktur für eine stabile Verankerung im Gewebe.

➤ RepoMark D

Design	RepoMark D Repositionierbarer Lokalisierungsdraht PRD2010
Artikel Nr.	
Drahtmaterial	Nitinol
Drahtdesign	doppelt verdreht, Doppelhaken
Material Kanüle	Edelstahl AISI 304
Kanülenspitze	16° Lanzettenspitze
Sichtbarkeit	echogene Oberfläche
Material Clip	Nitinol
Fixierung	Schiebeklemme
Tiefenkontrolle	Zentimetermarkierung + Schiebestopper

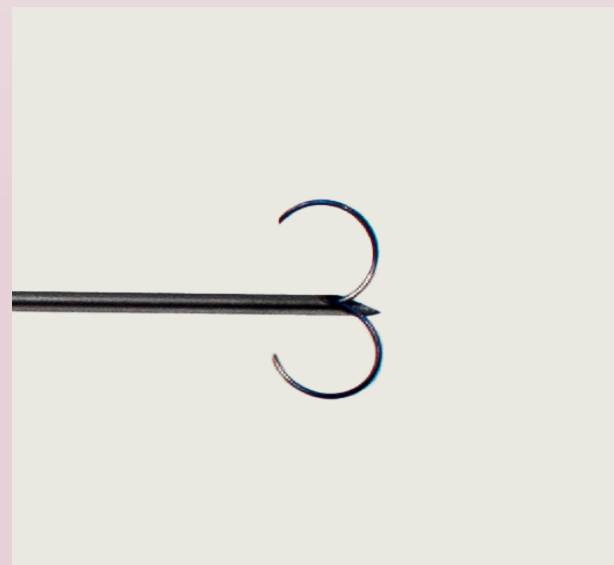

➤ RepoMark D

Hinweise

- Steriles Einmalprodukt – nur zur einmaligen Anwendung
- Repositionierung ausschließlich vor endgültigem Freisetzen des Drahtes
- Enthält Nickel (Nitinol) – Anwendung bei bekannter Nickelallergie nur nach ärztlicher Abklärung
- Nach Gebrauch gemäß geltenden medizinischen Richtlinien entsorgen